

## Phonak Roger - Schnellstart

1. Schalten Sie alle Geräte des Roger-Systems mit Ausnahme des Roger TouchMic (= Smartphone-ähnliches Hauptmikrofon) ein.

Anmerkung: Die Geräte DigiMaster 5000 (Lautsprecher) und DigiMaster X (Audio-Erweiterung) müssen zuvor an das Stromnetz angeschlossen werden.

2. Legen oder stellen Sie die Geräte so auf dass jedes Gerät mindestens 50cm Abstand zum anderen hat.

3. Schalten Sie nun das TouchMic ein.

4. Drücken Sie auf dem TouchMic die Taste „Connect“ und halten Sie es nacheinander in bis zu 20cm Entfernung zu den einzelnen Geräten so dass jedes Gerät nacheinander vom TouchMic erkannt wird. Jedes einzelne Gerät muss auf dem Display des TouchMic angezeigt werden.

5. Das Roger-System ist nun betriebsbereit.

6. Die Lautstärke des Pass-around-Mic (Handmikrofon) kann direkt am Mikrofon durch Drücken der + bzw. – Taste reguliert werden.

7. Die Lautstärke des DigiMaster wird über das TouchMic per Fernbedienung reguliert (Menüpunkt „DigiMaster“ im Display des TouchMic).

Beachten Sie dass sich die Funkreichweite des Roger-Systems auf ca. 20Meter beschränkt.